



Guía Rápida: Espacio Creación IA

Guía para Profesionales de la Salud


Primeros pasos

Antes de comenzar

Asegúrate de que tu ordenador esté conectado a Internet y de que las gafas estén encendidas, cargadas y conectadas al wifi.

Iniciar sesión


- Accede a: platform.xr.health
- Usa las credenciales de acceso que recibiste en el email "**Accede a tu cuenta de XRHealth**".
- Selecciona el Espacio en el que trabajarás durante la sesión.

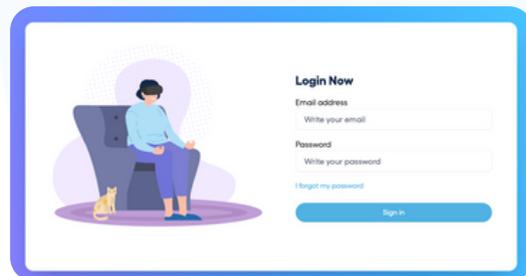

Página de Inicio

Aquí encontrarás:

- **Espacios:** Los diferentes Espacios disponibles. Los Espacios coloreados están incluidos en tu plan.
- **Mis Favoritos:** Entornos que has marcado como favoritos.
- **Entornos Recientes:** Los entornos que has usado recientemente.
- **Entornos Populares:** Los entornos más utilizados en XRHealth.

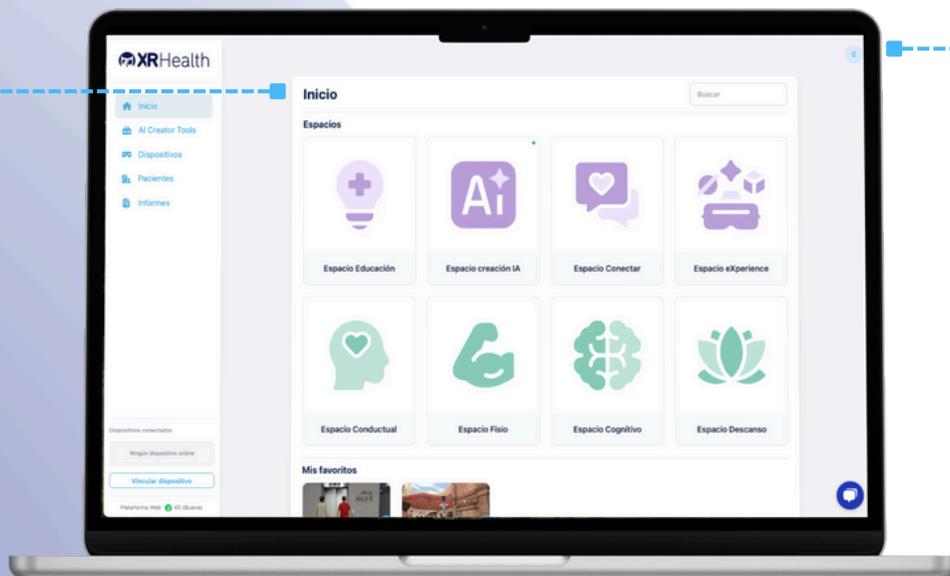

Configuración de Cuenta

Haz clic en tus iniciales en la esquina superior derecha para:

- Actualizar tus datos personales, la configuración de idioma o la contraseña

Nota: Para cambiar tu dirección de email, contacta al equipo de Apoyo al Cliente.




Guía Rápida: Espacio Creación IA

Guía para Profesionales de la Salud

Creación de un entorno virtual

La función generadora de IA para RV permite a los profesionales de la salud crear entornos terapéuticos inmersivos personalizados con tan solo un texto descriptivo. Esta herramienta es ideal para adaptar sesiones terapéuticas en ámbitos como la salud mental, la rehabilitación física y el entrenamiento cognitivo.

1 Abre el Generador de Entornos Virtuales de IA en las **Herramientas de IA Creator**.

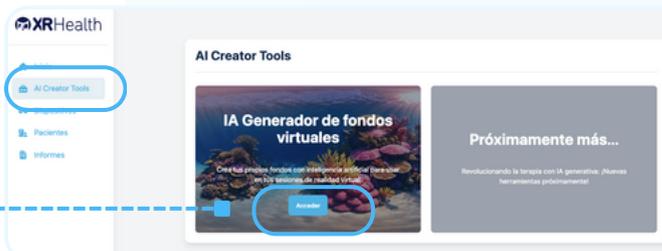

2 Haz clic en **Acceso** en el Generador de Entornos Virtuales IA.

3 Introduce una descripción del entorno que quieres crear. Por ejemplo, «bosque mágico con árboles resplandecientes y mariposas».



4 Selecciona un estilo visual, como «fotorrealismo M3» para conseguir un efecto tranquilizador.

5 Haz clic en **Generar**.

5 Si es necesario, ajusta la indicación y regenera el entorno.

Nota: La generación del entorno puede llevar algún tiempo.





Guía Rápida: Espacio Creación IA


Guía para Profesionales de la Salud

Lanzar Entornos

1. Crear un Perfil de Paciente

- 1 Haz clic en la pestaña **Pacientes**.
- 2 Haz clic en el botón **Nuevo Paciente** e ingresa el correo electrónico del paciente. El paciente recibirá un email de notificación.

Nota: XRHealth cumple con RGPD/LOPD y HIPAA para el almacenamiento y cifrado de registros de pacientes.

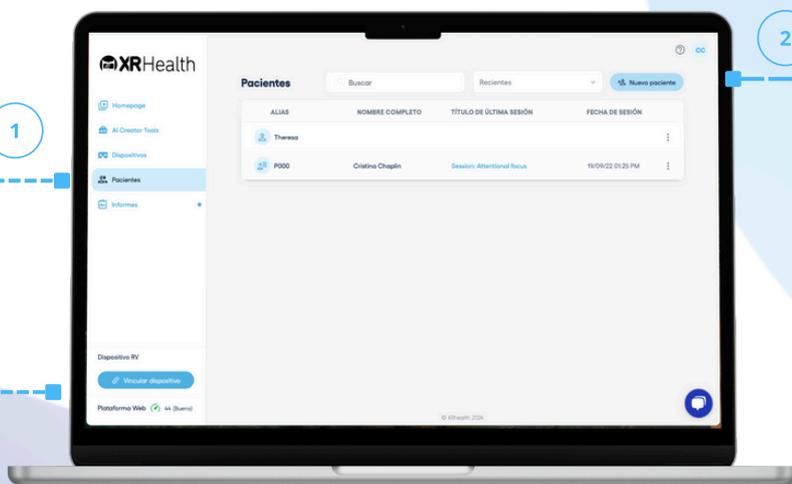


2. Vincular las Gafas

En las gafas VR:

- 1 Selecciona **Espacios Conductual, Descanso y Educación**.
- 2 Aparecerá un código de 4 caracteres.

En la plataforma web:

- 3 Haz clic en el botón **Vincular Dispositivo** en la esquina inferior izquierda de la plataforma.
- 4 Ingresa el código en la plataforma y haz clic en **Vincular**.

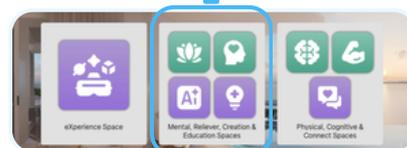

Vincular dispositivo

Para conectar un dispositivo, introduce el código de 4 caracteres que encontrarás en la aplicación de XRHealth de tu dispositivo





Guía Rápida: Espacio Creación IA

Guía para Profesionales de la Salud

3. Iniciar una Sesión en VR

1 Vincula tus gafas VR usando el código de emparejamiento rápido.
Nota: La vinculación es automático después de la primera vez.



2 En la Página de Inicio, selecciona el Espacio Creación IA.
Nota: Los Espacios coloreados están incluidos en tu plan.

3 Haz clic en **Lanzar Escena.**

4 Elige a tu paciente, completa los detalles de la sesión y haz clic en **Iniciar sesión** para comenzar.

5 Selecciona el entorno generado que coincida con los objetivos de la sesión y haz clic en **Enviar al dispositivo.**

6 Haz clic en **Reproducir** para iniciar la sesión en las gafas del paciente.
Nota: El entorno sólo se reproducirá en las gafas, no en la plataforma.

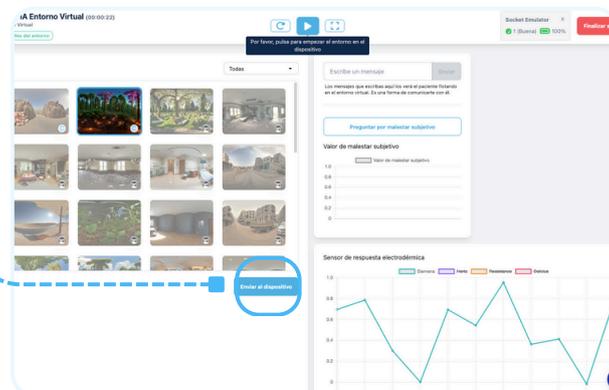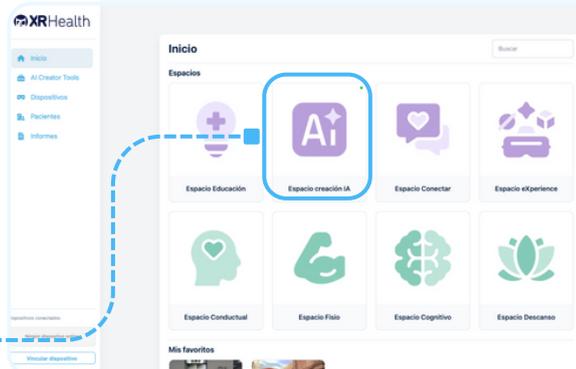



Guía Rápida: Espacio Creación IA

Guía para Profesionales de la Salud

4. Informe de la Sesión

Consulta el informe de fin de sesión

- 1 Ve a la sección **Informes**.
- 2 Busca y selecciona el informe.
- 3 Accede al informe de la sesión y visualiza los datos para obtener más información.

