



Guía Rápida: Espacio eXperience

Guía para Profesionales de la Salud

Casos de uso del Espacio eXperience

El Espacio eXperience proporciona una solución rápida y sin esfuerzo diseñada para una interacción mínima, lo que lo hace perfecto para clínicas y lugares de trabajo con mucho trabajo. Gracias a su tecnología fácil de usar, reduce el tiempo de tratamiento al simplificar el acceso a los contenidos terapéuticos, sin necesidad de inicio de sesión, conexión Wi-Fi ni configuración. Esta experiencia sencilla elimina las barreras, ya que requiere unos pasos mínimos y ningún esfuerzo por parte del profesional sanitario.

Aplicaciones idóneas

- Relajación y alivio del estrés
- Ejercicios de atención plena
- Reducción de la ansiedad preoperatoria
- Control del dolor
- Cuidados paliativos
- Terapia de distracción
- Mejor experiencia en la sala de espera
- Lucha contra el agotamiento
- Confort previo y posterior a los procedimientos

Antes de comenzar

Asegúrate de que las gafas y los mandos están completamente cargados y encendidos antes de usarlos. Para que la aplicación XRHealth funcione correctamente, busca actualizaciones con regularidad e instálalas cuando sea necesario. Estar al día garantiza la mejor experiencia y el acceso a las últimas funciones.

Cómo iniciar una sesión de RV


1 Encender

Pulsa los botones de encendido de las gafas y los mandos hasta que se enciendan las luces indicadoras azules.



2 Cómo colocar las gafas

Indícale al paciente que ajuste la rueda de la correa para conseguir un ajuste cómodo.

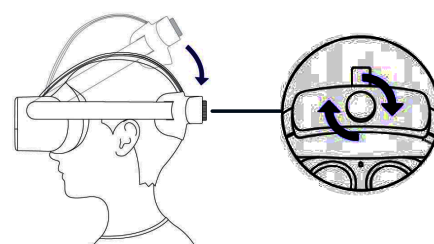

Nota: las gafas están diseñadas para llevarlas cómodamente con gafas de vista normales.



Guía Rápida: Espacio eXperience


Guía para Profesionales de la Salud

Cómo iniciar una sesión de RV - continuado

3 Seleccionar una experiencia

- Apunta en la pantalla a la experiencia de RV o vídeo que desees.
- Pulsa el botón de Disparar del mando para seleccionar tu elección.

Nota: Sólo puedes utilizar un mando.

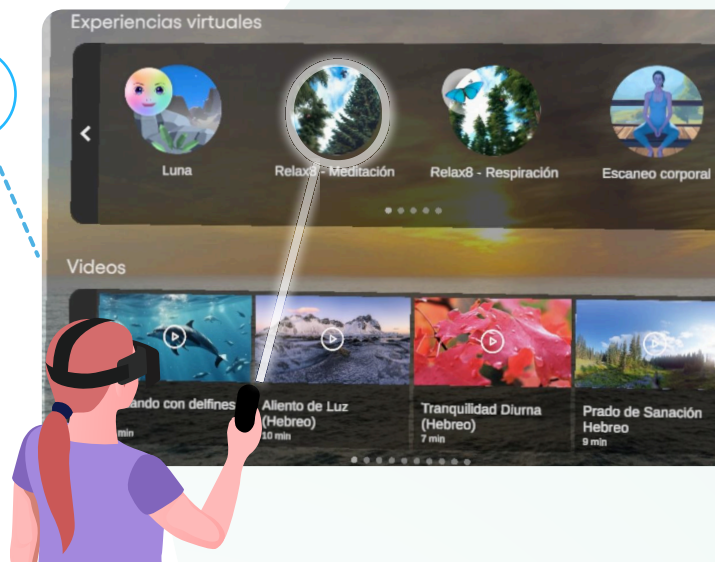

4 Finalizar una experiencia

- Pulsa el botón de Disparar del mando para detener la experiencia de RV.
- Aparecerá un menú: selecciona la opción para volver al menú principal.

